

# Röntgenschema X-ray scheme

Für **ML** Röntgenaufnahme  
For **ML** X-ray


Für **AP** Röntgenaufnahme  
For **AP** X-ray

Bitte einen Röntgenmarker (Beispiel: 1-Euro-Münze) an den angegebenen Stellen (Frontal- und Sagittalebene, jeweils auf Höhe des zu versorgenden Knochens) mit Heftpflaster befestigen und mitröntgen. Für die korrekte Maßberechnung benötigen wir bitte die Maße des Markers (z.B. den Münzdurchmesser bzw. die Angabe, um welche Münze es sich handelt).

Please affix a X-ray marker (example: 1 Euro coin) with adhesive band/tape in the designated positions (frontal and sagittal planes, at the level of the treated bone). Please specify the marker dimensions (example: coin diameter, or inform us which coin is used), so we can calculate the dimensions correctly.



Position der Marker für ML Röntgen-Aufnahme  
Marker position for X-ray in ML view

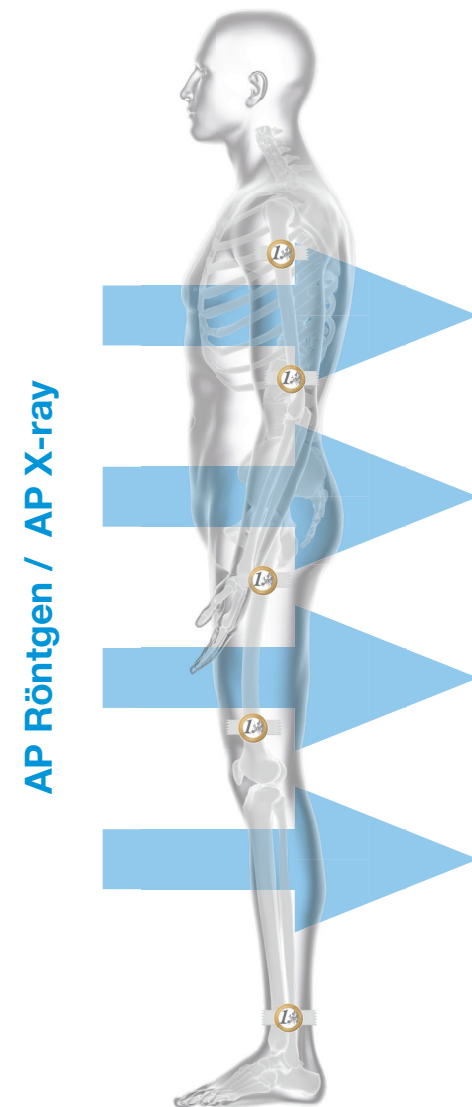

Position der Marker für AP Röntgen-Aufnahme  
Marker position for X-ray in AP view

unmaßstäblich  
no scale